



AirFit™ N20



Se ajusta fácilmente a ellos  
y a toda persona que se  
encuentre en el medio

El rostro de cada persona es diferente. Pero con nuestra nueva serie AirFit™ 20, ajustarse a un amplio rango de pacientes nunca ha sido tan fácil. Eso es porque cada mascarilla se ha diseñado especialmente para ajustarse a todos los pacientes, más allá de su perfil facial, lo cual elimina las constantes conjeturas en la selección de la mascarilla. Y con un reciente estudio internacional que demostró que la serie AirFit N20 se ajusta al 99 % de los pacientes,<sup>1</sup> usted puede confiar en que tendrá un buen desempeño en su diverso grupo de pacientes.



[ResMed.com/AirFitN20](https://www.ResMed.com/AirFitN20)



## Características destacadas de AirFit N20

**El arnés de felpa** está específicamente diseñado para brindar más suavidad y estabilidad.

**La almohadilla InfinitySeal™** ofrece lazos especialmente diseñados y diferentes niveles de grosor concebidos para prevenir soplos.

**El armazón blando y flexible** descansa debajo de los ojos y se adapta a diferentes tipos faciales, mientras que su relleno integrado ofrece mayor suavidad.

**El codo de liberación rápida** facilita la desconexión de los tubos de la mascarilla sin retirar la mascarilla.

**Los broches magnéticos** guían el arnés hacia el armazón de forma rápida y fácil.




AirFit N20 for Her

Diseñada específicamente para la mujer.

La serie AirFit N20 se ajustó a un excepcional porcentaje del 99 % de los pacientes en un reciente estudio internacional de ajuste.<sup>1</sup>

## Componentes de la mascarilla AirFit N20

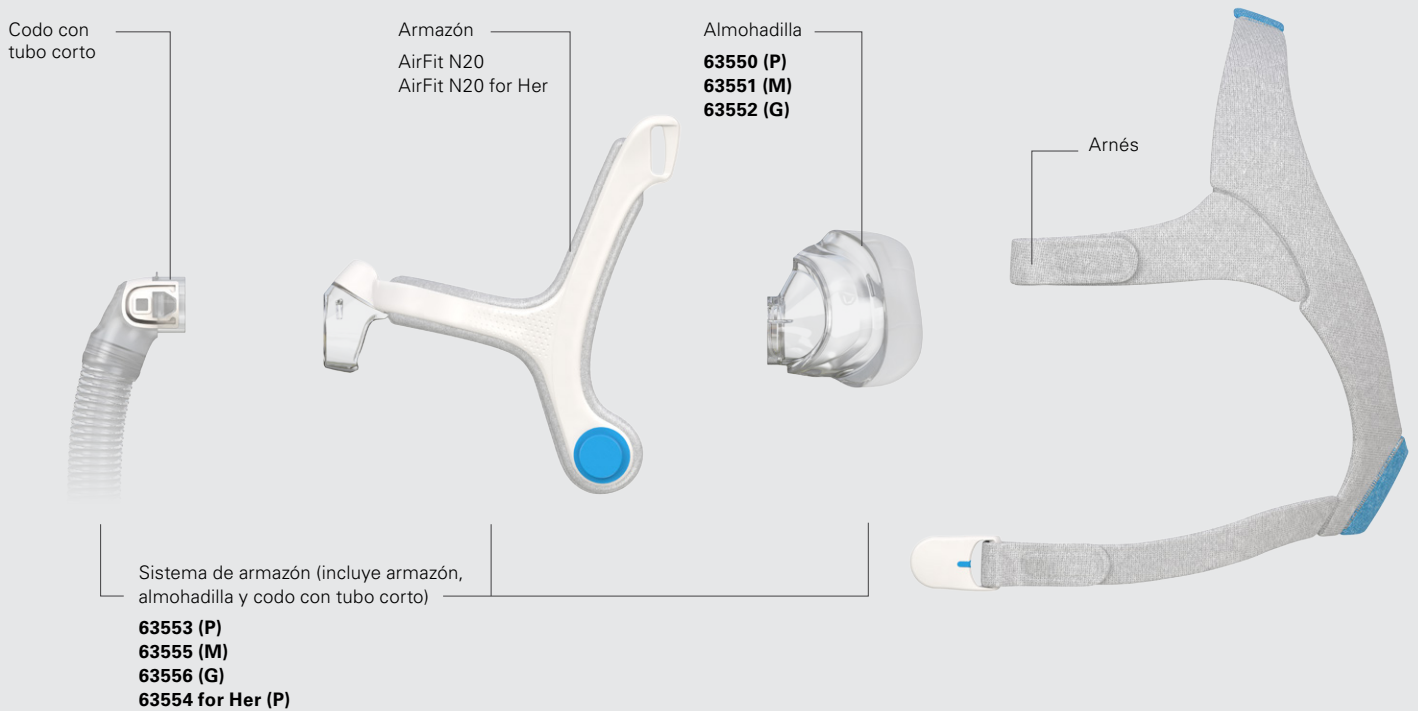

## Códigos de producto

**Sistemas completos de mascarillas** (Incluye sistema de armazón + arnés)

AirFit N20: Pequeña	<b>63503</b>
AirFit N20: Mediana	<b>63501</b>
AirFit N20: Grande	<b>63502</b>
AirFit N20 for Her	<b>63500</b>



Arnés de la serie AirFit N20 con broches de arnés  
**63560 (P)**  
**63561 (Est.)**  
**63562 (G)**



Arnés de la serie AirFit N20 for Her con broches de arnés  
**63558 (P)**

**AirFit™** N20



## Guía de ajuste de la mascarilla AirFit N20



- Para comenzar, asegúrese de que los imanes situados en las correas inferiores estén desabrochados.
  - Si están abrochados, dóblelos y sepárelos del armazón para desprenderlos.



- Coloque el arnés en la cabeza; asegúrese de que el logotipo quede hacia afuera.



- Posicione las correas inferiores de modo tal que ambas queden debajo de las orejas.
  - Suba cada uno de los imanes de forma tal que encajen con sus correspondientes broches en el armazón.



- Ajuste las lengüetas de sujeción en las correas superiores hasta que la mascarilla se sienta pareja y estable.
  - Vuelva a colocar las lengüetas de sujeción.



- Repita el paso 4 con las correas inferiores.
  - Vuelva a colocar las lengüetas de sujeción.



- Conecte el tubo de aire del dispositivo al codo, luego coloque el codo de modo que haga "clic", en la parte frontal de la mascarilla.
  - Encienda el dispositivo.



Consulte el manual del usuario para obtener más instrucciones y la información completa sobre la etiqueta en lo que concierne a las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

<sup>1</sup> Estudio internacional interno de ajuste de AirFit N20 de ResMed de pacientes actuales y nuevos con CPAP, realizado en noviembre de 2015.

Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. AirFit e InfinitySeal son marcas o marcas registradas de la familia de compañías de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © 2016 ResMed. 1019437/1 2016-11